

Универсальный раствор OKVision® SILVER предназначен для очистки, дезинфекции, удаления отложений, ополаскивания, увлажнения и хранения мягких контактных линз всех типов.

Правила использования:

1. Тщательно вымойте руки.
2. Снимите линзу и поместите ее на ладонь. Нанесите несколько капель раствора OKVision® SILVER и осторожно протрите линзу пальцем другой руки.
3. Тщательно ополосните линзу раствором OKVision® SILVER и поместите ее в контейнер. Повторите ту же самую процедуру для другой линзы.
4. Заполните обе ячейки контейнера раствором OKVision® SILVER и герметично закройте для дезинфекции не менее чем на 4 часа.
5. В случае необходимости дополнительной энзимной очистки раствор OKVision® SILVER можно использовать для растворения ферментных очистителей.

ВНИМАНИЕ! Всегда ополаскивайте Ваши контактные линзы свежим раствором OKVision® SILVER перед их применением. Если линзы не использовались больше двух недель, продезинфицируйте их свежим раствором OKVision® SILVER (см. шаг 4).

ВАЖНО: используйте контактные линзы только после консультации с Вашим врачом-офтальмологом. При возникновении неприятных ощущений в глазах немедленно снимите контактные линзы и обратитесь за помощью к Вашему офтальмологу. Впервые открывая раствор OKVision® SILVER, обратите внимание на целостность контрольного кольца. Не используйте раствор при нарушении целостности контрольного кольца. Никогда не используйте для промывания контактных линз и контейнера воду из-под крана, так как на поверхности линзы могут остаться микроорганизмы, которые могут вызывать воспаления глаз. Не рекомендуется менять марку раствора по уходу за линзами в течение периода замены контактных линз. Закрытый флакон хранить при комнатной температуре (15-30° С). Не замораживайте раствор. Не допускайте попадания на флакон прямых солнечных лучей. Берегите от детей.

Регулярно (не реже раза в 2-3 месяца) меняйте контейнер на новый.

Срок использования раствора OKVision® SILVER – не более 90 дней с момента открытия флакона, но не позднее даты окончания срока хранения (см. на упаковке).

СОСТАВ: специальные полимеры и ПАВ, ЭДТА, изотонический буферный раствор.

OKVision – зарегистрированный товарный знак, свидетельство №561234 от 30.12.2015