

# OKVISION®

## Инструкция по применению

### Уход за контактными линзами\*

#### Механическая очистка линз

Положите линзу на раскрытую ладонь и нанесите на нее несколько капель многофункционального раствора. Указательным пальцем аккуратно протрите поверхность линзы. Обязательно выполняйте эту процедуру, так как при этом удаляется 90% всех поверхностных загрязнений.

#### Дезинфекция

Поместите каждую линзу в соответствующую ячейку контейнера. Убедитесь, что свежий раствор полностью покрывает линзы. Ни в коем случае не используйте дважды один и тот же раствор. Тщательно закройте крышки контейнера и оставьте линзы минимум на 4 часа для полной дезинфекции.

#### Хранение

Если Вы не носите контактные линзы, то можете хранить их в растворе в течение недели при комнатной температуре, не меняя его.

#### Обратите внимание:

Старайтесь не касаться кончика открытого флакона с раствором, сохраняя содержимое стерильным. Не используйте раствор с истекшим сроком годности. Не переливайте раствор в другие емкости. Для каждой упаковки линз используйте новый контейнер. Замена контейнера должна быть не реже 1 раза в месяц.

\*Для безопасного ухода пользуйтесь инструкцией к средству ухода, рекомендованному вашим специалистом.

## Средства ухода

Окей Вижен рекомендует:



**OKVision® I care**  
Биосовместимый гипоаллергенный многофункциональный раствор для ухода за мягкими, жесткими газопроницаемыми и ортокератологическими контактными линзами.

#### OKVision® Bio Twin

Биосовместимый гипоаллергенный многоцелевой раствор с гиалуроновой кислотой для очистки, дезинфекции, хранения, ополаскивания и увлажнения любых мягких контактных линз.

Рекомендовано Финской Академией аллергии и астмы.



## Меры предосторожности

Всегда мойте руки перед манипуляцией с линзами. Не допускайте попадания косметики, лосьона, мыла, крема, дезодоранта, спрея, лака в глаза или на линзу.

Вы должны немедленно обратиться к врачу при следующих симптомах: боль в глазу, покраснение глаза, снижение остроты зрения, чувство жжения, зуд, дискомфорт, ощущения инородного тела при ношении линзы, необычные или более обильные выделения из глаз, «затуманенность» зрения, появление радужных кругов или ореолов, появление светобоязни, сухость глаз.

ООО «Окей Вижен»,  
г. Москва, ул. Михалковская, д. 63б, стр. 4.  
[www.okvision.ru](http://www.okvision.ru)



Рег. удост. № ФЦЗ 2007/01004