

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**  
**Линзы контактные мягкие OKVision®**

**РУ № ФСЗ 2010/07198 от 15.06.2010**

**Назначение:** Линзы предназначены для коррекции зрения.

**Надевание контактных линз:**

1. Тщательно вымойте руки с мылом.
2. Осторожно выньте линзу из блистера (флакона/контейнера).
3. Чтобы не путать линзы, всегда начинайте установку линз с правого глаза.
4. Осмотрите линзу и убедитесь в том, что она не повреждена (нет разрывов, она не сморщена по краям). Если линза кажется Вам поврежденной, не используйте ее. Возьмите следующую линзу из упаковки. Положите линзу на подушечку указательного пальца правой руки, проверьте, чтобы линза не была вывернута наизнанку. Линза должна напоминать пиалу-край обращены вверх. Если линза вывернута наизнанку, то она напоминает тарелку-край вывернуты наружу.
5. Оттяните верхнее веко к брови пальцем левой руки таким образом, чтобы оно не прикрывало глаз, даже если вы моргнете.
6. Положите линзу на подушечку указательного пальца правой руки и оттяните нижнее веко средним пальцем той же руки. Указательным пальцем положите на склеру ниже роговицы.
7. Убедившись, что линза разместилась на глазу, осторожно уберите палец, удерживая верхнее веко, посмотрите вниз на нос для точного позиционирования линзы. Отпустите верхнее веко и поморгайте.
8. Повращайте глазами под закрытыми веками. Моргните.
9. Критерием правильного положения линзы на глазу является повышение остроты зрения.
10. Повторите все манипуляции при установке линзы на другой глаз.

**Снятие контактных линз:**

1. Всегда снимайте первой ту линзу, с которой начинали установку (правую).
2. При снятии линз соблюдайте те же правила гигиены, что при их надевании.
3. Для снятия линзы вы можете использовать метод щипка. Этот метод поможет вам избежать повреждения роговицы (царапин).

Так же, как при надевании линз, встаньте перед зеркалом, склонив голову вперед, глядя вверх, указательным пальцем сместите линзу вниз на склеру.

Осторожно снимите линзу между указательным и большим пальцами в местах, соответствующих отметкам 3-х и 9-и часов на циферблате, снимите ее и поместите в контейнер с раствором.

**Обратите внимание:**

В течение первых недель после подбора линз Ваши глаза будут адаптироваться к ним. В этот период желательно постепенно (на 30-60 мин.) увеличивать время ношения линз в течение дня. Линзы необходимо снимать на ночь.

**Меры предосторожности:**

Всегда мойте руки перед манипуляцией с линзами. Не допускайте попадания косметики, лосьона, мыла, крема, дезодоранта, спрея, лака в глаза или на линзу.

Вы должны немедленно обратиться к врачу при следующих симптомах: боль в глазу, покраснение глаза, снижение остроты зрения, чувство жжения, зуд, дискомфорт, ощущения инородного тела при ношении линзы, необычные или более обильные выделения из глаз, «затуманенность» зрения, появление радужных кругов или ореолов, появление светобоязни, сухость глаз.

**Показания к применению:**

Коррекция зрения, ежедневное ношение.

**Противопоказания к применению:**

Нельзя использовать контактные линзы, если существует любое из следующих условий:

1. Острое воспаление или инфекция передней части глаза (красные глаза);
2. Любые заболевания глаз (эрозия роговицы, язва роговицы, конъюнктивит, кератит), травмы или нарушения, которые влияют на роговицу, конъюнктиву или веки;
3. Недостаточная слезная секреция (сухость глаз);
4. Пониженная чувствительность роговицы;
5. Любое системное заболевание, которое может повлиять на глаза или быть преувеличенным при ношении контактных линз;
6. Аллергия на любой ингредиент, который должен использоваться для ухода за контактными линзами;
7. Любая активная инфекция роговицы (бактериальная, грибковая или вирусная);
8. Если глаза становятся красными или раздраженными.

**Возможные побочные эффекты:**

Пациент должен быть проинформирован о том, что могут возникнуть следующие проблемы:

1. Боль в глазах;
2. Жжение в глазах или зуд (раздражение);
3. Дискомфорт, по сравнению с тем, когда линза была впервые установлена на глаз;
4. Ощущение чего-то в глазу (инородное тело, поцарапанная область);
5. Чрезмерное слезотечение;
6. Необычные выделения из глаз;
7. Покраснение глаз;
8. Снижение остроты зрения;
9. Затуманенное зрение, радуга или ореолы вокруг предметов;
10. Чувствительность к свету (светобоязнь);
11. Сухие глаза;
12. Эрозия роговицы, язва роговицы, конъюнктивит, кератит;

Если пациент замечает что-либо из вышеперечисленного, он должен немедленно снять линзы.

**Рекламации:**

В случае возникновения претензий по качеству мед. изделий рекламации отправлять уполномоченному представителю по адресу:

ООО «Окей Вижен», 125438, г. Москва, ул. Михалковская, д. 63Б, стр. 4.

[www.okvision.ru](http://www.okvision.ru)

